

Panorama Test - Anleitung zu Blutentnahme und Versand

Blut der Mutter

1. Entnahme von 2x10 ml Blut der Mutter in Streck-Röhrchen (*schwarz-brauner Deckel*). Röhrchen durch mehrmaliges Kippen gut mischen.
Die Röhrchen müssen mindestens zu 3/4 gefüllt sein.
(Blutentnahme nicht mit Butterfly Nadel)
2. Röhrchen mit vollständigem Namen und Geburtsdatum der Patientin beschriften.
3. Röhrchen in Transporthülle legen.
4. Transport zum Labor Genetica AG:
 - a. Transporthülle und vollständig ausgefülltes Auftragsformular „*Auftrag für nicht-invasive pränatale Untersuchungen*“ in Versandtüte legen.
 - b. Absenderadresse auf Versandtüte notieren und Versandtüte verschliessen.
 - c. Vor **Schalterschluss** Versandtüte auf die Post bringen (*Mond-Express*) oder falls im Raum Zürich, Veloblitz anrufen (*044 272 72 72*).
 - d. Probe bei Raumtemperatur zwischenlagern. **Blut keinesfalls kühlen oder einfrieren.**

Versand

